

# Tipal <ティパル> 取扱説明書

## ◆ 特徴

- 粒が落ちない一体型の安心設計
- 形状、サイズで選べる2パターン
- 金属アレルギーの方にも安心な樹脂素材

## ◆ 仕様


Tipal<ティパル>Size1mm Tape9mm	
品番	000-0747
形状	円錐
サイズ	1mm
テープ径	9mm

Tipal<ティパル>Size0.5mm Tape7mm	
品番	000-0746
形状	半円
サイズ	0.5mm
テープ径	7mm

## ◆ 使用上の注意

- 本品の使用目的以外の用途には、使用しないでください。
- 傷や湿疹などのある場所、目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 敏感肌の方、かぶれやすい方は1~2粒で経過を見た上でご使用ください。
- 本品をご使用になり、発疹や発赤、かゆみなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光、水濡れ、高温多湿を避けて保管してください。

## ◆ 使用方法

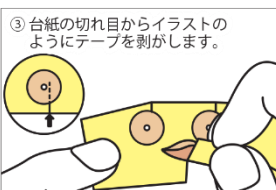

- 貼る前に、皮膚の汗やほこりなどをよく拭き取ってからご使用ください。
- 台紙から1枚ずつテープを剥がして貼り付けてください。
- 1日ごとに貼りかえてください。

販売元：トワテック株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷 2-3-7

お茶の水元町ビル 2階

☎ 0120-609-151

受付時間：平日 9:00 - 18:00

www.towatech.net